

Nylon Master glijzeil / Slide Master

MC 001-1111
Nylon Master Tunnelvormig
Uniek

Afmetingen:
120x120 cm



Wassen en drogen

Wastemperatuur: 40 - 85°C
Droogtrommel: **max 40°C**
Aan de lucht laten drogen
verlengt de levensduur
aanzienlijk

Gebruik geen wasverzachter.

Wasmiddel mag geen
bleekmiddel of
chloorbevattende verbindingen
bevatten

Bij twijfel: +31 646745109

SolutionS2Care

Importeur Master Care Producten

WAARSCHUWING



Het risico bestaat dat de gebruiker
over de rand van het bed glijdt



Laat de gebruiker nooit liggen op
Master Care verzorgingsproducten
met het bedhek omlaag



Laat de gebruiker nooit achter
terwijl het Master Care product
aan de lift is gekoppeld of met
het bedhek omlaag

Belangrijk

- Deze producten mogen niet worden gebruikt als ze ernstig versleten of anderszins beschadigd zijn
- Gebruik de producten altijd volgens deze handleiding
- Controleer altijd de stiksels van deze producten - zowel vóór als na gebruik
- Neem onmiddellijk contact op met uw Master Care dealer in geval van twijfel over het juiste gebruik van de producten
- Master Care en Solutions2care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen met lichamelijk letsel als de producten niet volgens deze handleiding worden gebruikt
- Handel met Master Care is te allen tijde onderhevig aan de geldende handelsvoorwaarden.
- **Velcro banden moeten gesloten zijn tijdens het wassen en drogen.**
- **Tijdens het wassen en drogen MOETEN de bandjes zijn bevestigd op het klittenband aan de bovenkant.**

1. Plaatsing van de Nylon Master glijzeil/Slide Master



De client buigt zijn/haar been en houdt zich vast aan het bedhek. Vouw de Nylon Master glijzeil als een harmonica op tot het midden, en plaatst vervolgens het glijzeil onder de schouders en de heup. Zorg dat zowel het hoofd als de bips/heupen op het glijzeil komt.



Laat de client teruggdraaien op de rug. Haal het glijzeil onder de schouder en heup weg. Of Trek de Nylon Master/Slide Master recht terwijl de client het tegenoverliggende bedhek vasthoudt



De patiënt draait zich weer in een liggende positie en het Nylon Master/Slide Master is nu correct gepositioneerd onder de cliënt. Plaats een kussen tussen glijzeil en hoofd. Wrijving onder de client zijn drukpunten is nu gereduceerd

2. De Nylon Master glijzeil verwijderen via de onderlaag van het glijzeil




Stop het glijzeil zoveel mogelijk onder de client. Doe het bedhek omhoog. Loop om naar de andere zijde en pak de onderste laag van de Nylon Master/Slide Master



Verplaats je gewicht en maak gebruik van de dubbele glijwerking om de Nylon Master/Slide Master onder de client vandaan te trekken.

Andere optie voor het verwijderen van het glijzeil:

1. Stop het glijzeil zoveel mogelijk onder de client, plaats het bedhek omhoog en loop om. Steek je arm door het glijzeil en pak de onderste laag vast, en trek het glijzeil binnenste buiten onder de client vandaan.

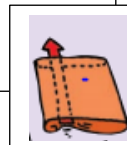


Zie ook:

<https://www.goedgebruik.nl/filmpjes>


3. De client hoger in bed plaatsen



Plaats de Nylon Master/Slide Master onder schouders en bekken van de client. Zie tekst bij plaatjes bij 1. Zorg dat hoofd, romp, bekken/heupen goed op het glijzeil ligt en het Kussen onder het hoofd is geplaatst.

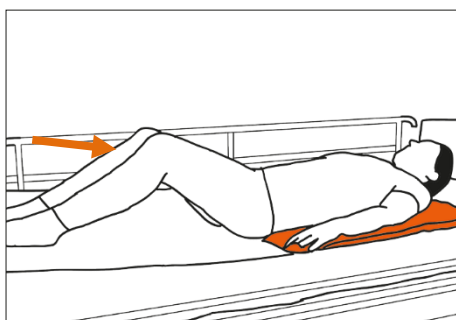

De client buigt zijn/haar benen, zet zich af en of hulpverlener duwt net onder de knieën (zie pijl), of plaatst een arm onder de bovenbenen door, steunt af met zijn andere arm op het bed, waarbij hij/zij de client omhoog verplaatst, waarbij voeten in de richting van de beweging staan.

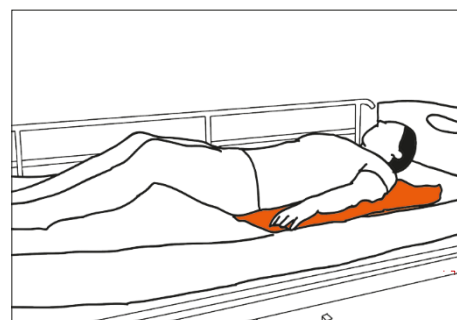


Met behulp van de Nylon Master/Slide Master kan de client nu op eigen kracht hoger in bed glijden.

Andere opties om de client hogerop in bed te plaatsen is door optimaal gebruik te maken van hulpmiddelen zoals o.a. het bed:

1. Wanneer het bed beschikt over Trendelenburg stand, maak hier dan gebruik van. Voeteneind hoger plaatsen dan het hoofdeind;
2. Plaats het voeteneinde omhoog als het bed geen Trendelenburg stand kent;
3. Wanneer de client het zelf wil doen, maar de voeten glijden weg, kun je de voeten tegenhouden of een antislipmatje plaatsen

4. Benen buigen met de Nylon Master glijzeil/Slide Master

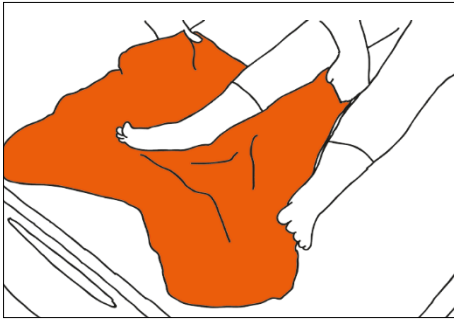

Plaats de Nylon Master/Slide Master onder onderbeen en voet van de client




Plaats de ene hand op de voet van de client en de andere hand onder diens knieholte




Breng het been in de gewenste positie door het gewicht te verplaatsen m.b.v. het glijzeil en verwijder de Nylon Master/Slide Master

5. Op de rand van het bed zitten met behulp van de Nylon Master glijzeil/Slide Master

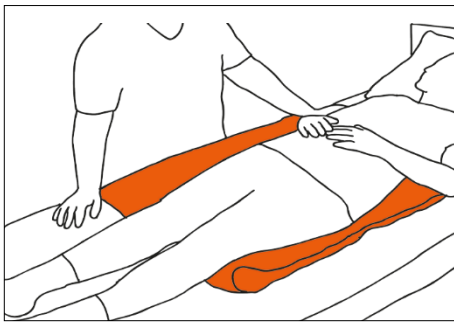

Plaats de Nylon Master/Slide Master onder de client (zie tekst bij plaatje 1), op een afstand van **ca. 15 cm** van de bedrand.

Let op: alleen uitvoeren als de client een goede romp/zitbalans heeft!!

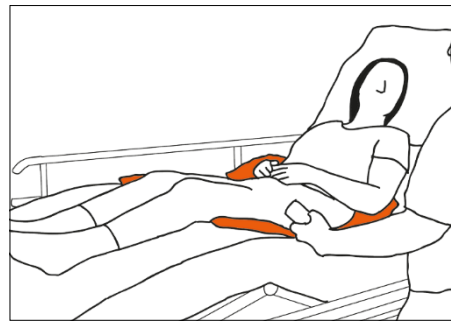


Breng het bed in fowler stand, ofwel breng het hoofdeinde en onder de knieholten omhoog van de client

Let op: alleen uitvoeren als de client een goede romp/zitbalans heeft!!



Begeleid de benen van de cliënt over de rand van het bed, terwijl de patiënt zich met zijn/haar armen afzet of de Master Bed Grip gebruikt. De wrijving onder de bekken van de patiënt wordt verminderd en de patiënt kan zich omdraaien. Goede romp/zitbalans is vereist!

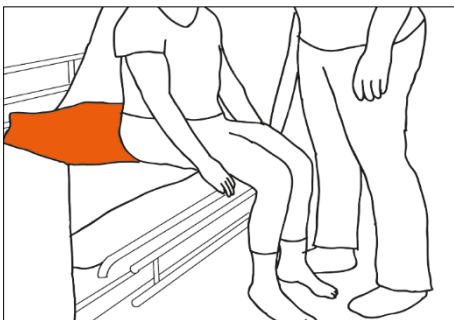

Breng het bed omlaag zodat de voeten van de client de vloer raken

Let op: alleen uitvoeren als de client een goede romp/zitbalans heeft!!

Waarschuwing:

Het is niet mogelijk iedereen met het glijzeil van lig naar zit op de rand van het bed te verplaatsen. Het is noodzaak dat de zorgverlener bekend is met de aanwezige romp/zitbalans. Dat hij/zij het glijzeil voldoende van de rand van het bed plaatst.

Bij onvoldoende romp/zitbalans kan bij het handelen, de client achterover of zijwaarts bewegen, waardoor het glijzeil kan gaan glijden.


Bij deze handeling moet men goed de (on)mogelijkheden van de client kennen om deze techniek toe te passen. Het is dan ook niet geschikt voor elke client.

Andere optie om de weerstand bij het draaien in bed weg te nemen is het gebruik van **de instelbare Turner Master draaischijf**. Dit product bestaat uit twee schijven die ten opzichte van elkaar glijden en de onderlaag die op het bed ligt is van antislip.

Turner Master Multi draaischijf (M, L, XL, XXL)



6. Omdraaien in bed met behulp van de Nylon Master/Slide Master

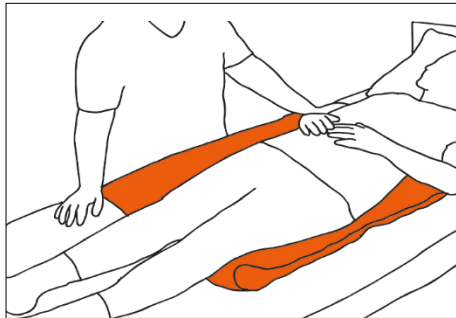

Plaats de Nylon Master/Slide Master onder de client, zie tekst bij plaatje 1. Let op: Nu ligt de tunnel in de richting van de beweging, dus van zijkant bed naar zijkant bed! Zorg ook hier dat hoofd, romp, bekken/bips goed op het glijzeil ligt.

Kruis of buig een been van de client en leg het kussen aan de kant waar de client naartoe wordt gedraaid. Plaats je handen op de schouders en de heup van de client terwijl die het bedhek vasthoudt. Verplaats je gewicht om de client in zijligging te rollen.

Randvoorwaarden: Plaats het glijzeil onder de client (zie ook 1). Zorg dat het hoofd, romp, bekken/bips op het glijzeil ligt. Plaats een kussen tussen het hoofd en het glijzeil. Dit zorg ervoor dat tijdens de verplaatsing, het hoofd meebeweegt.

Opties om te draaien in bed:

- Begeleid de benen iets op zij in de richting waarna je de client wil verplaatsen. Plaats een hand op schouder en heup, en verplaatst de client iets uit het midden. Bereid je client voor door een been te kruizen of in te buigen en de armen voor langs de borst te kruizen. Zorg ervoor bij het draaien op de zij de juiste arm bovenligt, zodat bij het draaien de cliënt mee kan helpen het bedhek te pakken als hij/zij dat wenst/kan. Ga in schredestand staan (één been voor en één been achter) en verplaats je gewicht om de client naar je toe te draaien.
- Bereid je client voor door een been te kruizen of in te buigen en de armen voor langs de borst te kruizen. Zorg ervoor bij het draaien op de zij de juiste arm bovenligt zodat bij het draaien de cliënt mee kan helpen het bedhek te pakken als hij/zij dat wenst/kan. Plaats het bed iets lager dan de werkhoogte. Pak de bovenlaag van de tunnelglijzeil links en rechts, dicht bij het lichaam, met volle hand vast. Zorg dat je in schredestand staat (één been voor en één been achter). Verplaats je gewicht naar achteren om de client in één beweging naar je toe te bewegen en van je af te draaien. Dat betekent dat je je gewicht naar achter verplaatst en vervolgens gaat staan om in één soepele beweging de client op de zij te draaien.
- Bereid je client voor door een been te kruizen of in te buigen en de armen voor langs de borst te kruizen. Zorg ervoor bij het draaien op de zij de juiste arm bovenligt zodat bij het draaien de cliënt mee kan helpen het bedhek te pakken als hij/zij dat wenst/kan. Trek aan de bovenlaag van het glijzeil, in kleine 'stukjes' de cliënt op de zij. Doe dit rustig en stapsgewijs.

Voordelen

Nylon Master glijzeil

- Glad aan beide kanten
- Gemaakt van extra-sterk nylondraad
- Eenvoudig onder de client te plaatsen en te verwijderen
- Biedt de mogelijkheid de client te activeren
- Meerdere toepassingsmogelijkheden
- Zacht en geluidloos
- Zeer duurzaam

Kennisdeling – Informatie:

Wanneer de client volgens de mobiliteitsklassen beperkt of nauwelijks kan meewerken, denk dan ook eens aan de Master Turner Glijlakens. Deze zijn leverbaar in small, medium, large, en extra large. De client kan hier permanent op blijven liggen. Het materiaal is gemaakt van een biologische vulling die transpiratievocht afvoert. Het voorkomt vocht, allergieën en minimaliseert daarom het risico op decubitus. Zie ook www.solutions2.care