

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(NL) Handleiding

02_20230112_NL

Nylon Master



MC 001-1101



MC 001-1106



MC 001-1204




MC 001-1206



MC 001-1220



MC 001-1271

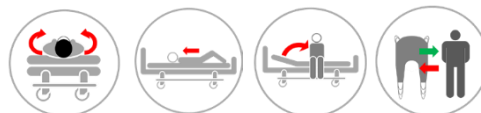

Artikelnr.	HMI nr.	Naam Maat	UDI-DI/GTIN
<input type="radio"/> MC 001-1101	34304	Nylon Master Tunnel - XS	5744001970171
<input type="radio"/> MC 001-1102	34305	Nylon Master Tunnel - S	5744001970188
<input type="radio"/> MC 001-1103	34306	Nylon Master Tunnel - M	5744001970195
<input type="radio"/> MC 001-1104	34307	Nylon Master Tunnel - L	5744001970201
<input type="radio"/> MC 001-1106	81812	Nylon Master Tunnel - Basic	5744001973097
<input type="radio"/> MC 001-1201	34300	Nylon Master Open - XS	5744001973103
<input type="radio"/> MC 001-1202	34301	Nylon Master Open - S	5744001970232
<input type="radio"/> MC 001-1203	34302	Nylon Master Open - M	5744001970249
<input type="radio"/> MC 001-1204	34303	Nylon Master Open - L	5744001970256
<input type="radio"/> MC 001-1206	101812	Nylon Master Open - Overlock	5744001970263
<input type="radio"/> MC 001-1210	33232	Slide Master Nylon gepolsterd - S	5744001973127
<input type="radio"/> MC 001-1220	33233	Slide Master Nylon gepolsterd - M	5744001970270
<input type="radio"/> MC 001-1271	39025	Slide Master Nylon gepolsterd - Breed	5744001973134

Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1



ISO 12 31 03 20
ISO 12 31 03 21

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Distributeur Nederland

Solution2Care



Bedankt voor het kiezen van een product van master care A/S.

Wij raden aan om de gebruikershandleiding grondig te lezen voordat u het product(en) in gebruik neemt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de getoonde producten, op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten zijn gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product verandert, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door master care A/S, is de CE goedkeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem bij twijfel contact op met de distributeur Solutions2care BV die Master Care vertegenwoordigt in NL.

MDR (EU) 2017/745:

Producten in deze gebruikershandleiding voldoen aan de normen in de verordening voor medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745 voor apparatuur van klasse 1 en zijn daarna CE-goedgekeurd.

Aangegeven doeleinden voor dit product:

Het product wordt gebruikt in twee lagen, tunnel of opgevouwen stof om wrijving te verminderen voor gebruikers met een functiebeperking, bijvoorbeeld bij het bewegen, aankleden of tijdens training. Het product kan worden gebruikt om het risico op schuifschade te minimaliseren.

Gebruik van het product:

Plaats het product onder de punten waar de wrijving moet worden verminderd. Gebruik altijd het dubbellaagse product om maximale wrijvingsreductie te bereiken. Haal het product na gebruik altijd onder de gebruiker vandaan om het risico op vallen en oververhitting van de huid te minimaliseren.

Waarschuwing:

Maak altijd een risicobeoordeling voordat u het product gebruikt, vooral als het product wordt gebruikt onder het steunvlak van de gebruiker in een zittende positie op bijvoorbeeld de rand van het bed. Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende steun onder de voeten heeft. Laat het product nooit op de grond liggen, dit kan een risico op vallen opleveren.

Risicobeoordeling:

Voorafgaand aan gebruik dient er een risico- en functiebeoordeling te worden gemaakt voor de huidige gebruiker, zodat de transfer op ergonomische en juridisch verantwoorde wijze plaatsvindt.

Kennis van het product/overdracht:

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product goed is geïnstrueerd in het gebruik van het product. En de gebruikershandleiding goed heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.

master care A/S en onze NL Distributeur 'Solutions2care BV' geeft Voorlichting over het gebruik van Master Care producten en op onze websites zijn alle gebruikshandleidingen te vinden.

Levensduur:

De verwachte levensduur van producten van nylon glijmateriaal bij dagelijkse gebruik en gemiddeld wassen is 1-3 jaar. De levensduur van het product is afhankelijk van gebruik, gewicht client en hoe en hoe vaak het product wordt gewassen en gedroogd.

Producten die niet langer voldoende wrijvingsvermindering bieden voor een gezonde beweging voor zowel helper als gebruiker, moeten worden weggegooid. Producten moeten regelmatig worden geïnspecteerd en als defecte stiksels of beschadigde oppervlakken worden gevonden, moet het product worden weggegooid.

Garantie:

master care A/S en Distributeur biedt een Garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten als het product correct gebruikt wordt.

Onbedoelde incidenten en schade door verkeerd gebruik:

Onbedoelde incidenten moeten te allen tijde worden gemeld aan de bevoegde nationale bevoegde autoriteit en aan master care A/S via haar distributeur. master care a/s aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke of productschade als het product wordt gebruikt in strijd met het door de fabrikant opgegeven doel.



Handleiding - Nylon- / Slide Master


Inhoudsopgave

Aanbrengen van de Nylon Master/Slide Master Pag. 4
Draaien in bed met de Nylon Master/Slide Master Pag. 4
Hogerop in bed plaatsen met de Nylon Master/Slide Master Pag. 4
Gebruik van Nylon Master om benen te buigen Pag. 5
Verplaats het kussen met de Nylon Master Pag. 5
Verwijderen van de Nylon Master/Slide Master Pag. 5
Technische specificaties Pag. 6



Handleiding - Nylon- / Slide Master

Aanbrengen van de Nylon Master/Slide Master:

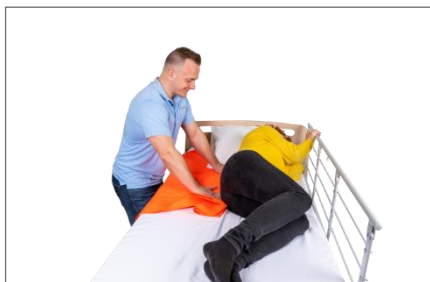

1. Nodig gebruiker uit 't been te buigen en draait via het vastpakken beddek op de zij. De Nylon Master en/of Slide Master vouwen en onder drukpunten van de gebruiker schuiven.



2. Gebruiker houdt beddek vast en helper pakt Nylon Master/Slide Master vast en strijkt het glad.



3. Gebruiker keert terug naar rugligging. De Nylon Master/Slide Master is nu correct onder de gebruiker gepositioneerd (schouders, romp, bips) en de wrijving onder de drukpunten van de gebruiker is verminderd.

Draaien in bed met de Nylon Master / Slide Master:



4. Nylon Master/Slide Master wordt onder de drukpunten van de gebruiker geplaatst. Bereid de gebruiker voor, voor het op de zij draaien. Kussen iets opzij schuiven, uitnodigen de benen te buigen, armen voor de borst te kruizen, of het beddek laten vastpakken.



5. Draai de gebruiker naar de zijpositie. Sta in schredestand, een been voor en een been achter (in de richting van de beweging), en trek voorzichtig aan de bovenlaag van de Nylon Master/Slide Master terwijl de gebruiker op de zij draait.



6. Gebruiker buigt de benen. Helper plaatst een hand onder de heup van de gebruiker en de andere hand wordt op het bovenbeen geplaatst om de gebruiker op de zij te rollen.

Hogerop in bed plaatsen met de Nylon Master/Slide Master:



7. Plaats de Nylon Master/Slide Master met de rolrichting naar boven (opening tunnel aan de zijkant). Zorg dat deze de schouder en het bekken bedekt.



8. Gebruiker buigt de benen en zet af en tilt het bekken op. Bij het wegglijden van de voeten kan een antislipmat worden gebruikt, en/of de helper houdt de voeten tegen.

Handleiding - Nylon- / Slide Master

Gebruik van Nylon Master om benen te buigen:



9. Nylon Master/Slide Master wordt onder het onderbeen/voet van de gebruiker geplaatst met de plooi naar het lichaam gericht. Gebruik een kniebuiging en holte boven de hiel om de nylon master te plaatsen.

Ondersteun de voet/knie terwijl het been gebogen is door op de Nylon Master te schuiven.

Verplaats het kussen met behulp van Nylon Master:



10. Ideaal voor gebruikers met een zwaar hoofd of die hun hoofd in het kussen drukken.

Plaats de Nylon Master tussen het hoofd en het kussen van de gebruiker. Ondersteun de gebruiker onder het hoofd en verplaats het kussen.

Verwijderen van de Nylon Master/Slide Master:



11. Duw de Nylon Master/Slide Master aan één kant onder de gebruiker - gebruik de holtes.



12. Aan de andere kant van het bed grijpt de helper de onderste laag van de Nylon Master / Slide Master vast.



13. De helper trekt de Nylon Master/Slide Master er onderuit door gewichtsoverdracht zodat de ene laag over de ander laag kan bewegen.

Handleiding - Nylon- / Slide Master

Technische specificaties

Materiaal:

Nylon Master: Nylon

Slide Master Gepolsterd: Nylon, polyester

Artikelnummer	Naam	Afmeting	Max. gebruikersgewicht
MC 001-1101	Nylon Master tunnel - XS	L 30 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1102	Nylon Master tunnel - S	L 60 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1103	Nylon Master tunnel - M	L 80 x B 80 cm	180 kg
MC 001-1104	Nylon Master tunnel - L	L 100 x B 80 cm	180 kg
MC 001-1106	Nylon Master tunnel - Basic	L 75 x B 70 cm	180 kg
MC 001-1201	Nylon Master Open - XS	L 30 x B 120 cm	180 kg
MC 001-1202	Nylon Master Open - S	L 60 x B 120 cm	180 kg
MC 001-1203	Nylon Master Open - M	L 80 x B 160 cm	180 kg
MC 001-1204	Nylon Master Open - L	L 100 x B 160 cm	180 kg
MC 001-1206	Nylon Master Open - Overlock	L 80 x B 160 cm	180 kg
MC 001-1210	Slide Master Nylon gepolsterd - S	L 30 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1220	Slide Master Nylon gepolsterd - M	L 50 x B 60 cm	180 kg
MC 001-1271	Slide Master Nylon gepolsterd- Wide	L 60 x B 100 cm	180 kg

Waarschuwing



Laat product nooit op de rand van het bed achter.



Laat product niet op de grond liggen.



Zorg dat alle relevante remmen op de rem staan alvorens handeling uit te voeren.



CE-label:

De producten zijn goedgekeurd in overeenstemming met de huidige regelgeving voor CE-markering en voldoen aan verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische Apparatuur, klasse 1.

For more information, video
Quick Guide mm.,
see www.master-care.dk



Gebruikersgewicht:

Advies max. gebruikersgewicht: 180 kg
Het max. gebruikersgewicht is afhankelijk van functionaliteit gebruiker en soort transfer. Alle transfers moeten goed en gezond zijn voor gebruiker en helper.



Wassen:

Dit product kan in de wasmachine op max. 85 °C worden gewassen.
Voorzichtig wassen en drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk



Reinigingsmiddel pH level:

Dit product verdraagt was- en desinfectiemiddelen met pH-waarde tussen 5-9



Wasverzachter:

Gebruik nooit wasverzachter, dit



Droogtrommel:

Dit product voorzichtig op max. 40 °C drogen. Drogen aan de lucht verlengt levensduur aanzienlijk



Oppervlakte reiniging:

Dit product kan worden gereinigd met natt doek en zeep



Desinfectie:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddel met pH 5-9.



Strijken:

Niet strijken.



Stomerij:

Niet stomen



Bleken:

Niet bleken.



Onderhoud:

Over regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden of banden. Producten met hoge wrijving of andere tekortkomingen moeten worden weggegooid en z.n. vervangen



Handleiding:

Lees de gebruikershandleiding altijd grondig door voordat u het product gebruikt.



Beschikbaarheid:

Zorg er Altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggoien van het product

Distributeur Nederland

Solution²Care

