

MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

# (NL)Gebruikershandleiding

03\_20230107\_NL

## Hand Master



MC 001-1002



○

Artikelnr.	HMI nr.	Naam - maat	UDI-DI/GTIN
MC 001-1002	86521	Hand Master - Grijs	574400197003

Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1  
ISO 12 31 03 20



The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



Distributeur NL

**Solution<sup>2</sup>Care**

Solutions2care.NL



# Bedankt voor het kiezen van een product van master care A/S.

Wij raden aan om de gebruikershandleiding grondig te lezen voordat u het product(en) in gebruik neemt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de getoonde producten, op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten zijn gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product verandert, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door master care A/S, is de CE goedkeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem bij twijfel contact op met de distributeur Solutions2care BV die Master Care vertegenwoordigt in NL.

## MDR (EU) 2017/745:

Producten in deze handleiding zijn CE-goedgekeurd en voldoen aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Regulation MDR(EU) 2017/745-Klasse 1.

## Het beoogde gebruik van het product:

Het product wordt gebruikt om wrijving te verminderen voor gebruikers met een functiebeperking, bijvoorbeeld bij het bewegen, aankleden of tijdens training. Het product kan worden gebruikt om het risico op schuifschade te minimaliseren.

## Correct gebruik van het product:

Het product kan worden gebruikt om een gebruiker achteruit te laten glijden in bijvoorbeeld een rolstoel, om wrijving tijdens het draaien in bed te verminderen en/of om schuifflappen op matrasbeschermers recht te trekken.

## Waarschuwing:

Laat het product niet lang onder de gebruiker liggen, aangezien dit ongepaste veranderingen in het microklimaat van de huid kan veroorzaken. En laat het product niet op de grond liggen, dit kan ervoor zorgen dat het valt.

## Risico beoordeling:

Voorafgaand aan gebruik moet een risico- en functiebeoordeling van

de gebruiker worden gemaakt zodat de overdracht ergonomisch en in overeenstemming met de wet plaatsvindt.

## Kennis van het product/overdracht:

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product goed is geïnstrueerd in het gebruik van het product. En de gebruikershandleiding goed heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.

master care A/S en onze NL Distributeur 'Solutions2care BV' geeft Voorlichting over het gebruik van Master Care producten en op onze websites zijn alle gebruikshandleidingen te vinden.

## Levensduur:

Het product heeft naar verwachting een levensduur van 1-3 jaar bij normaal gebruik en wassen. De levensduur van het product is afhankelijk van het gebruik, de belasting en hoe en hoe vaak het product wordt gewassen en gedroogd.

Producten moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Producten die niet langer voldoende wrijvingsvermindering bieden voor een gezonde beweging voor zowel helper als gebruiker, moeten worden weggegooid. Als het product defecte stiksels of gebroken oppervlakken heeft, moet het product worden weggegooid.

## Garantie:

master care A/S en distributeur geeft 2 jaar garantie op materiaal- en productiefouten als het product correct is gebruikt.

## Onbedoelde incidenten en schade door verkeerd gebruik:

Onbedoelde gebeurtenissen /verwondingen moeten altijd worden gemeld aan de bevoegde nationale autoriteit en aan Master Care A/S via de distributeur in het huidige land.

master care A/S en onze Distributeurs, zoals Solutions2Care BV, nemen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of productschade als het product en/of producten zijn gebruikt in strijd met het door de fabrikant aanbevolen beoogde doel of correct gebruik van het product(en).



# Handleiding - Hand Master

## Indholdsfortegnelse

Verplaatsen van de actieve gebruiker achterin de stoel door 1 helper .....	pagina 2
Gedeeltelijke actieve gebruiker van houding (zijligging) veranderen op het laken door 1 helper .....	pagina 2
Schuiflappen op matrashoes weg halen of plaatsen zonder liftgebruik door 1 helper .....	pagina 3
Technische specificaties .....	pagina 4



# Handleiding - Hand Master

## Verplaatsen van de actieve gebruiker achterin de stoel door 1 helper:



1. Helper plaatst de hand in de Hand Master.



2. Vraag de gebruiker naar de zijkant, bijvoorbeeld tegen de armléuning te leunen om het zitvlak te ontlasten.



3. Met de handpalm naar boven wordt de hand met de Hand Master onder de iets opgetilde bil geleid.



4. Vraag de gebruiker om met de bil tegen de Hand Master te drukken en zichzelf naar achteren te duwen. Helper duwt lichtjes met de andere hand op de knie van de gebruiker.



5. Tegelijkertijd duwt de helper de hand met de Hand Master naar achteren, waardoor de gebruiker achteruit in de stoel beweegt. Het proces wordt aan de andere kant herhaald, zodat de gebruiker rechtop gaat zitten.

## Gedeeltelijke actieve gebruiker van houding (zijligging) veranderen op het laken door 1 helper:



6. De helper plaatst hand in Hand Master. De actieve gebruiker buigt beide benen en stemt er, indien mogelijk, iets mee af. Helper plaatst de hand met de Hand Master onder de heup.



7. De helper ondersteunt met de hand de ene heup. Draai de gebruiker naar de zijlig door het bekken naar achteren te duwen, hierbij helpt de antislip in de Hand Master. Gebruik indien mogelijk de benen als hefboom met de andere hand.



8. Helper trekt de handpalm uit de Hand Master en grijpt de losse Hand Master, en trekt hem uit.

# Handleiding - Hand Master

## Schuifflappen op matrashoes weg halen of plaatsen zonder liftgebruik door 1 helper:



9. Til de schuifflap op en plaats deze opgevouwen tussen de matrashoes en de Master Turner. Breng Hand Master aan op één of beide handen.



10. Plaats de handpalmen in het midden van de schuifflap en schuif de schuifflap onder de gebruiker door de hand(en) naar voren en naar de zijkanten te bewegen. Voel je vrij om meerdere keren te herhalen. Stop met het plaatsen van de witte riemen bovenop de flap - gebruik de lichaamsholte.



11. Als de schuifflap is ingeschoven, wordt de zorgvrager licht zijwaarts naar de helper bewogen. Aan de andere kant wordt de schuifflap uitgetrokken en wordt het klittenband aan de matrashoes bevestigd.

# Gebruikershandleiding – Productnaam

## Technische specificaties

### Materiaal:

Nylon

### ISO classificering:

ISO 12952-1 smeulende sigaret voor ontstekingsbron  
ISO 12952-2 Ontstekingsbron komt overeen met vlamequivalent.

### Artikelnr Naam

MC 001-1002 Hand Master - Grijs

### Afmeting:

L 50 x B 18 cm

## Waarschuwing



Laat product nooit op de rand van het bed achter.



Laat product niet op de grond liggen.



Zorg dat alle relevante remmen op de rem staan alvorens handeling uit te voeren.



### CE-label:

De producten zijn goedgekeurd in overeenstemming met de huidige regelgeving voor CE-markering en voldoen aan de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen, klasse 1.

Voor meer informatie, video Quick Guide mm., zie [www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)

### Gewicht gebruiker:

Het product heeft geen maximaal gebruikersgewicht, aangezien dit afhangt van het functieniveau van de gebruiker en de beweging. De overdracht dient gezondheidsverantwoord te gebeuren voor zowel gebruiker als hulpverlener.



### Strijken:

Niet strijken



### Wassen:

Dit product kan in de wasmachine tot max. 85 °C. Voorzichtig wassen en drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk



### Stomerij:

Niet stomen



### Reinigingsmiddel pH level:

Dit product verdraagt was- en desinfectiemiddelen met pH-waarde tussen 5-9



**Bleken:** Niet bleken



### Wasverzachter:

Gebruik nooit wasverzachter, dit vermindert de glij-eigenschappen aanzienlijk.



### Onderhoud:

Over regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden of banden. Producten met hoge wrijving of andere tekortkomingen moeten worden weggegooid en z.n. vervangen



**Droogtrommel:** Dit product mag alleen voorzichtig op max. 40 °C. worden gedroogd. Aan de lucht drogen verlengt de levensduur aanzienlijk.



### Handleiding:

Lees de gebruikershandleiding altijd grondig door voordat u het product gebruikt.



### Oppervlakte reiniging:

Het oppervlak van dit product kan worden gereinigd met natte doek en zeep.



### Beschikbaarheid:

Zorg er Altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggoien van het product



### Ontsmetten:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddelen met een pH waarde tussen 5-9.

Find or på:

