

# MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.

# (NL) Gebruikershandleiding

37\_20240828\_ML

## Accessoires voor masterturner

Voor de originele Master Turner



MC 001-1947



MC 001-1948



MC 001-1950



klasse 1 de originele Scandinavische

Verordening MDR 2017/745 voor medische Hulmiddelen klasse 1. ISO 12 31 03 25



Artikelnr.	HMI	Naam - Grootte	UDI-DI/GTIN
MC 001-1947	84373	Master Turner - Trekbanden	5744001970898
MC 001-1948	81998	Master Turner - Verstelbare banden	5744001970904
MC 001-1950	85234	Master Turner - Vergrendelbare banden	5744001970928

The original Nordic  
Concept van Human Handling



Distributeur NL

## Solution<sup>2</sup>Care

Molekap 15 8521 MH Sint Nicolaasga

[www.solutions2.care](http://www.solutions2.care)

Developed &  
Manufactured by:



master-care.dk

# Bedankt voor het kiezen van een product van Master Care A/S.

We raden aan de gebruikershandleiding grondig door te lezen voordat u het product(en) gebruikt.

De informatie in deze gebruikershandleiding is van toepassing op de getoonde producten op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten worden gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product wijzigt, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door Master Care A/S, is de CE-goedgekeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem in geval van twijfel contact op met Master Care A/S of onze distributeur Solutions2care BV.

## MDR (EU) 2017/745:

De producten in deze gebruikershandleiding zijn CE-goedgekeurd en voldoen aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. De product(en) voldoen aan de normen in de Medical Device Regulation MDR (EU) 2017/745 - Klasse 1.

## Het beoogde gebruik van het product/-s:

De producten zijn bedoeld om de functionaliteit van de Master Turner te vergroten door het comfort / de veiligheid te verhogen, de riemen te verlengen, de Master turner aan het bedframe te bevestigen of de omtrek van de matrashoes te vergroten.

De producten worden gebruikt door gebruikers die een Master Turner System nodig hebben.

## Correct gebruik van het product:

De producten hebben verschillende functionaliteiten. Raadpleeg deze gebruikershandleiding voor meer informatie.

## Contra-indicaties:

Als er sluitriemen worden gebruikt om de masterturner vast te zetten, moet eerst het weefsel van de gebruiker worden beoordeeld, om te beoordelen of het vastzetten van de masterturner een passend risico op snijwonden bij de gebruiker kan veroorzaken. Het gebruik van verstelbare riemen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren voor de gebruikers

met de neiging om hun achterwerk snel en kritiekloos naar voren te bewegen of gebruikers met extentietoon.

## Waarschuwing:

Zorg ervoor dat alle riemen correct zijn gemonteerd.

Zorg ervoor dat het bedframe/inlegraam de kracht van de trekriemen of vergrendelingsriemen kan dragen.

## Risicobeoordeling:

Maak altijd een risicobeoordeling en een functionele beoordeling van de gebruiker voordat u het product gebruikt. Op deze manier is het gebruik van het product voor het verplaatsen van een gebruiker ergonomisch en juridisch verantwoord.

## Kennis van het product/overdracht:

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product de juiste instructies heeft gekregen voor het gebruik van het product en dat hij de gebruikershandleiding grondig heeft gelezen voordat hij het product gebruikt.

master care A/S en onze distributeurs geven voorlichting over het gebruik van producten en op onze website zijn alle gebruikershandleidingen te vinden.

## Levensduur:

De verwachte levensduur van producten met dagelijkse slijtage en wassen is gemiddeld 2-5 jaar. De levensduur is afhankelijk van het gebruik, de belasting door de gebruiker, de was- en droogtemperaturen en hoe vaak het product gewassen en gedroogd wordt.

Voer regelmatig visuele inspecties uit, bij voorkeur voor elk gebruik. Producten met defecte naden, gebroken materiaal of andere gebreken moeten worden weggegooid. Zo behoudt u altijd een gezonde werkomgeving voor zowel de helper als de gebruiker.

## Garantie:

master care A/S geeft 2 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten als het product correct is gebruikt.

**Onbedoelde voorvallen en letsel bij verkeerd gebruik van de producten:** Ongewilde voorvallen moeten altijd gemeld worden aan de bevoegde nationale instantie en aan Master Care A/S of de distributeur in het betreffende land.



# Gebruiksaanwijzing - Master Turner Accessoires

## Verstelriemen:



1. Bevestig de lus van de verstelbare riem aan het tweepuntsjuk en bevestig de lange riem in de schouder- en heuphandgrepen van de master turner. Sluit de gesp.



2. Zet het bed in een zittende positie. De verstelband kan indien nodig worden aangepast om de Master Turner comfortabel om de gebruiker te omhullen.



3. Het grote voordeel van het gebruik van de aanpassingsbanden is het comfort en de veiligheid die de gebruiker voelt wanneer de Master Turner om hem of haar heen zit. Het geeft ook ondersteuning en daarmee stabiliteit aan gebruikers met duizeligheid, waarnemingsstoornissen of andere problemen. Vermindert evenwichtsgevoel bij het zitten op de rand van het bed.

## Riemen met vergrendeling:



4. Verwijder het voeteneind en trek de matras iets naar beneden. Bevestig de twee Locking Straps aan de onderkant van de hoofdsteen met het lange verstelbare uiteinde van de straps. Of breng het hoofdsteen omhoog, en bevestig de straps.



Leid het vaste uiteinde van de vergrendelband door de bovenste band van de masterturner. Sluit de gesp. Herhaal aan de andere kant.



5. De vergrendelingsriemen houden de Master Turner op zijn plaats wanneer de hoofdsteen omhoog staat. Let op: Houd rekening met het risico op afschuiving.

## Trekbanden:



6. Bevestig de trekbanden op de bovenste riemen van de strop van de masterdraaiër.



7. Schuif de trekbanden onder het bedframe of bij voorkeur onder een handgreep aan de muur. Bevestig de trekbanden aan de tillift met tweepuntsjuk. Til de tillift op en trek de zorgvrager langzaam omhoog in het bed. Let op: Controleer of het bedframe de trekkracht kan weerstaan.



8. Bevestig de trekbanden aan de heup- en schouderriemen van de Master Turner. Vul de ruimte tussen de bedden op. Trek langzaam aan de trekbanden en schuif de gebruiker van het ene bed naar het andere.

# Gebruiksaanwijzing - Master Turner Accessoires

## Technische specificaties

Artikelnr. - Productnaam:	Grootte:	Max. gebruikershoogte:	Max. gewicht gebruiker:	Inhoud product:	Gewicht product:
MC 001-1947 Master Turner Trekbanden	L 140 x B 5 cm	200 kg	Niet relevant	100% katoen.	0,19 kg
MC 001-1948 Master Turner - Verstelbare banden	L 80 x B 3 cm	200 kg	Niet relevant	61% Polyester, 39% Nylon.	0,11 kg
MC 001-1750 Master Turner – vergrendel banden	L 47 x B 4 cm	200 kg	Niet relevant	23% Polyester, 77% Nylon.	0,38 kg

## WAARSCHUWINGEN



Laat de gebruiker nooit het product wanneer je op de rand van het bed ligt.



Laat het product nooit op de vloer liggen.



Zorg er altijd voor dat de gebruiker niet verstrikt raakt in de riemen.



Laat de gebruiker nooit op het product liggen terwijl het is aangesloten op een takel.



Niet gebruiken als mitella. Kan worden gecombineerd met een tillift voor bijvoorbeeld herpositionering in bed.



Zorg ervoor dat alle relevante remmen geactiveerd zijn voordat de gebruiker wordt overgedragen.



**CE-certificering:**  
Dit product is CE-goedgekeurd en voldoet aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. De product(en) voldoen aan de normen in de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische



### Gebruikersgewicht:

Aanbevolen max. gebruikersgewicht: 200 kg



### Wassen:

Het product kan gewassen worden bij 60 °C. Zacht wassen en droog drogen verlengt de levensduur aanzienlijk.



### Detergenten pH-waarde:

Dit product verdraagt reinigings-/ontsmettingsmiddelen met een pH-waarde tussen 5-9.



### Wasverzachter:

Gebruik nooit wasverzachter, omdat dit de glij-eigenschappen aanzienlijk vermindert.



### Droog tuimelen:

Dit product mag alleen voorzichtig droog getrommeld worden op max. 40 °C. Airdrying verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



### Schoonmaken van het oppervlak:

Het oppervlak van dit product kan worden gereinigd met een natte doek en zeep.



### Ontsmettingsmiddelen:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddelen met een pH-waarde tussen 5-9.



### Strijken:

Niet strijken.



### Chemisch reinigen:

Niet chemisch reinigen.



### Bleken:

Niet bleken.



### Onderhoud:

Voer regelmatig visuele inspecties uit, bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden, gespen en riemen. Producten met gebreken moeten worden weggegooid.



### Gebruikershandleiding:

Lees altijd eerst de gebruikershandleiding voordat u het product gebruikt.



### Verwijdering:

Zorg er altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggooien van het product.

Ga voor meer informatie, video's Snelle handleiding enz. naar [www.solutions2.care](http://www.solutions2.care)



SCAN ME

Distributeur NL

## Solution<sup>2</sup>Care

Molekap 15 8521 MH Sint Nicolaasga  
M. 06 4674 5109 E. [info@solutions2.care](mailto:info@solutions2.care)  
[www.solutions2.care](http://www.solutions2.care)

Vind ons op:  
  
  
 Master.care.dk



Drukfouten worden voorbehouden.