

Dit product is ontwikkeld en vervaardigd uit grondstoffen en met productie in Europa.



Kies voor kwaliteit, bespaar geld en bescherm het milieu.

## Beknopte gids

(NL) Master Turner Royal - voor matrashoezen



Het originele Master Turner-systeem

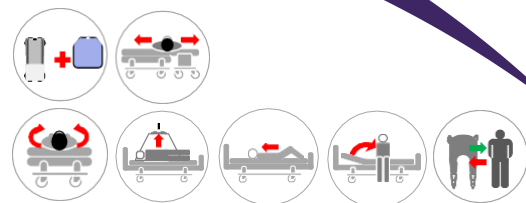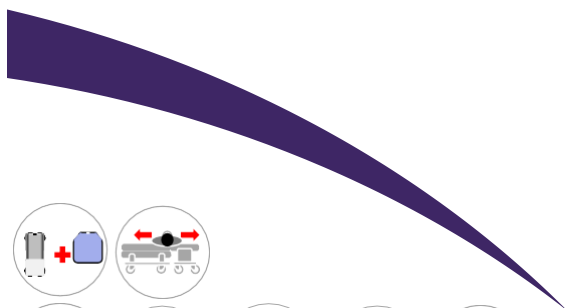

Item nr./Artikelnr.	HMI-nr.	Naam/Naam - Grootte/Maat	UDI-DI
<input type="radio"/> MC 001-1713	131089	Master Turner Royal - S	5744001973912
<input type="radio"/> MC 001-1723	131090	Master Turner Royal - M	5744001973929
<input type="radio"/> MC 001-1734	137037	Master turner Royal Combi - L	5744001974834
<input type="radio"/> MC 001-1735	128452	Master Turner Royal - L	5744001973936
<input type="radio"/> MC 001-2535	131086	Master Turner Royal Inco - L	5744001973974

### Inspectie:

Controleer het product regelmatig, bij voorkeur voor elk gebruik. Controleer of er geen schade is aan de stof, riemen, naden enz. Als het product veel wrijving heeft of op een andere manier kapot is, moet het product worden weggegooid.



### Onderhoud:

Voer regelmatig visuele inspecties uit, bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden en riemen. Producten met veel wrijving of andere gebreken moeten worden weggegooid en vervangen.



(NL) Laat de gebruiker het product nooit op de rand van het bed liggen.



(NL) Laat het product nooit op de grond liggen.



(NL) Laat een gebruiker nooit op het product liggen terwijl het is aangesloten op een lift.



(NL) Zorg er altijd voor dat de gebruiker niet verstrikt raakt in de riemen.



(NL) Zorg ervoor dat alle relevante remmen vergrendeld zijn voordat u wegrijdt.




(NL) Niet gebruiken als tilband - kan voordelig worden gecombineerd met een lift voor bijvoorbeeld draaien in bed.




(NL) Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen klasse 1  
ISO 12 31 03 21




# De originele Master Turner

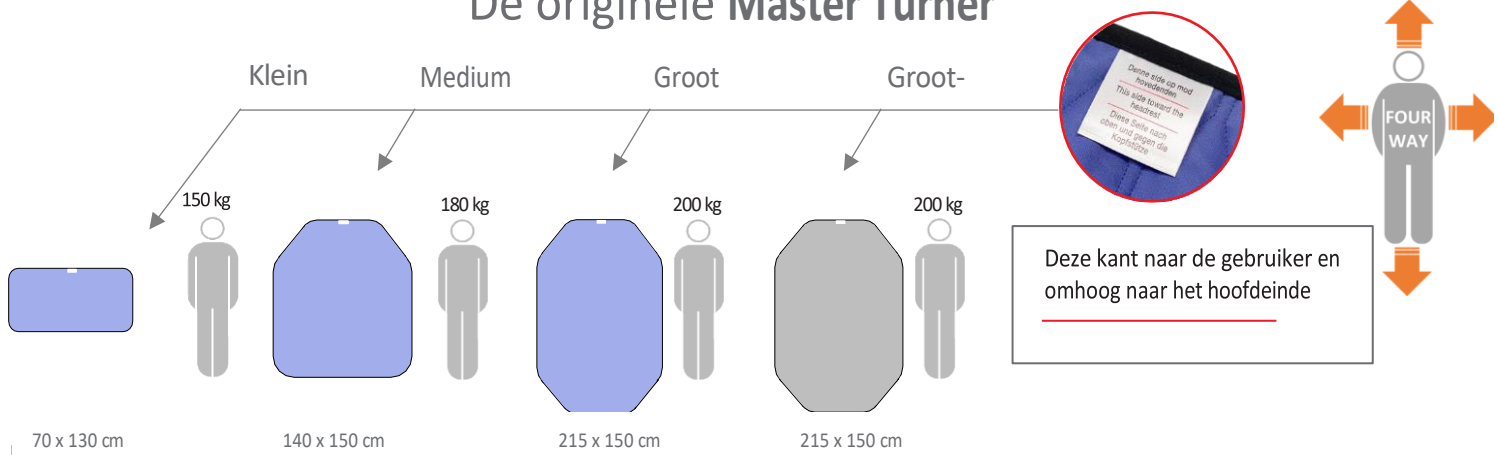

## (NL) Combinaties

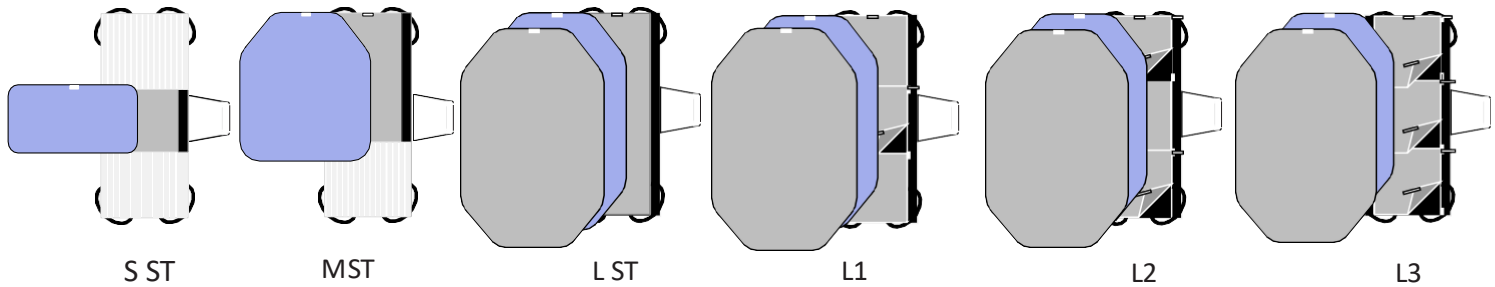

## (NL) Toepassingen

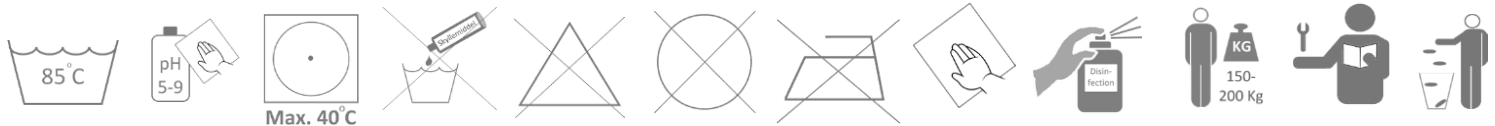

- (NL) Zacht wassen en drogen in de droogtrommel verlengt de levensduur aanzienlijk.
- Voorkeur drogen aan de lucht.
- (NL) Gebruik nooit wasverzachter, omdat dit de glij-eigenschappen aanzienlijk vermindert.
- Niet bleken.



Distributeur NL  
**Solution<sup>2</sup>Care**

Vind ons op:



Solutions2care BV Molekap 15 8521 ND Sint Nicolaasga  
 M. +31 6 4674 5109 E. info@solutions2.care